

São Paulo de de 200\_\_

A/C.:

**Referência: Check list para instalação e treinamento de Affinity**

**Prezado cliente**

Segue anexo o check list de Instalação e treinamento. Para agendamento e programação da instalação assim como o treinamento dos usuários, será levado em consideração as informações contidas nesta instrução e consequente adequação do local.

Por favor enviar este documento devidamente preenchido por e mail ou fax para o Departamento Técnico.

Nome: \_\_\_\_\_ Telefone/Fax: \_\_\_\_\_

E mail: \_\_\_\_\_

Colocamo-nos a disposição para prestar esclarecimentos necessários.

***O não atendimento aos pré-requisitos (\*) apontados neste documento, pode, a critério da Pyramid Medical, acarretar cancelamento total ou parcial da garantia do equipamento.***

***O cliente arcará com as despesas decorrentes do re-agendamento da instalação e/ou treinamento por não atendimento do pré-requisitos apresentados neste documento.***

*O período estimado para instalação é de 18 horas e o treinamento operacional de 4 horas. Para Treinamento Operacional solicitamos a presença das técnicas em período integral.*

Atenciosamente

Cliente:

Endereço:

Cidade:

U.F.:

Telefone/Fax:

Contato:

E mail:

### Instrução e Pré requisitos para Instalação

#### ITENS OBRIGATORIOS PARA A INSTALAÇÃO Condições físicas e elétricas

	Ítem	Sim	Não
1	Circuito elétrico independente de 220VAC/40 A *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Fiação elétrica disponível para instalação e terra físico devidamente ligado ao circuito elétrico independente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ar condicionado instalado (Temperatura de Operação do equipamento) 15° a 25° C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A sala destinada ao equipamento atende a norma de Segurança Radiológica determinadas pela legislação vigente e descritas pela RDC 50 e Portaria 453 da Anvisa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Estabilizador de tensão com transformador isolador e blindagem eletrostática disponível e instalado no local. Corrente máxima 40 A entrada 220V ± 15%, saída 220V, ± 3%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Disjuntor de 60 A para ligação do estabilizador no quadro de força *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Itens necessários para instalação e treinamento NÃO fornecidos pela PyramidMedical

	Descrição	Marca/Modelo
1	Processadora de filme e/ ou CR dedicados para mamografia (Instalada e Calibrada).	
2	Filme para calibração do AEC (Controle automático de exposição)**	
3	Cassete 18 x 24 cm com janela de identificação. Cassete 24 x 30 cm com janela de identificação.	
4	Tipo de filme	


1 – Deverá ser disponibilizada uma caixa de filme para cada tipo de filme a ser utilizado na calibração do AEC. (\*\* Aplicável para processadora de filme).

2 – Cada tipo de filme tem seu cassete específico. Para otimização dos resultados de qualidade de imagem, recomenda-se que seja utilizado filme e cassete compatível.


(\*\* Aplicável para processadora de filme).

3 – A não utilização de material adequado poderá trazer prejuízo na qualidade da imagem, não podendo a Pyramid Medical ser responsabilizada por esta perda de qualidade.

### DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

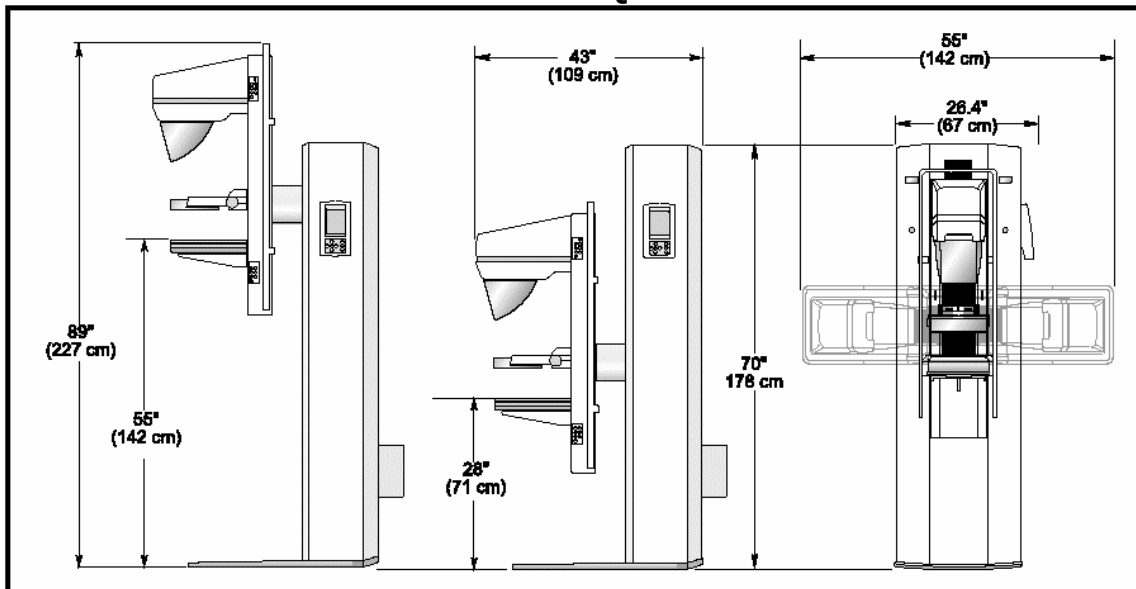

### EXEMPLO DE LAYOUT – SALA DE MAMOGRAFIA

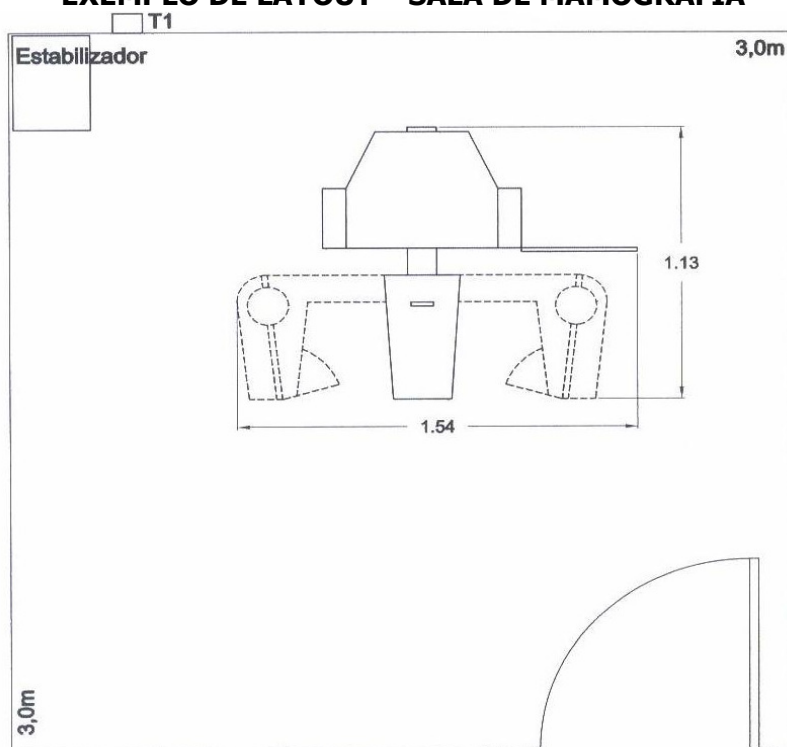

Declaro estar ciente e de pleno acordo com as informações contidas neste documento.

Nome Legível/Assinatura/Data  
(Cliente)