

São Paulo de de 2007

A/C.:

**Referência: Check list para instalação e treinamento de Discovery/Explorer**

**Prezado cliente**

Segue anexo o check list de Instalação e treinamento. Para agendamento e programação da instalação assim como o treinamento dos usuários, será levado em consideração as informações contidas nesta instrução e conseqüente adequação do local.

Por favor enviar este documento devidamente preenchido por e mail ou fax para o Departamento Técnico.

Nome: \_\_\_\_\_ Telefone/Fax: \_\_\_\_\_  
E mail: \_\_\_\_\_

Colocamo-nos a disposição para prestar esclarecimentos necessários.

***O não atendimento aos pré-requisitos (\*) apontados neste documento, pode, a critério da Pyramid Medical, acarretar cancelamento total ou parcial da garantia do equipamento.***

***O cliente arcará com as despesas decorrentes do re-agendamento da instalação e/ou treinamento por não atendimento do pré-requisitos apresentados neste documento.***

O período estimado para instalação é de 16 horas e o treinamento operacional de 8 horas. Para Treinamento Operacional solicitamos a presença das técnicas em período integral.

Atenciosamente

Cliente:

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ U.F.: \_\_\_\_\_

Telefone/Fax: \_\_\_\_\_ Contato: \_\_\_\_\_

E mail: \_\_\_\_\_


**Instrução e Pré requisitos para Instalação**
**ITENS OBRIGATORIOS PARA A INSTALAÇÃO**  
**Condições físicas e elétricas**

	Item	Sim	Não
<b>1</b>	Circuito elétrico independente de 220VAC/20 A *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	Fiação elétrica disponível para instalação e terra físico devidamente ligado ao circuito elétrico independente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	Ar condicionado instalado (Temperatura de Operação do equipamento) 15° a 25° C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	A sala destinado ao equipamento atende a norma de Segurança Radiológica determinadas pela legislação vigente e descritas pela RDC 50 e Portaria 453 da Anvisa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	Nobreak com estabilizador de Tensão, com transformador isolador e blindagem eletrostática de 220V, 3 Kva e variação máxima de 15% e tensão de saída máxima de 3%, DEVIDAMENTE INSTALADO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Itens necessários para instalação e treinamento NÃO fornecidos pela PyramidMedical**

	Descrição	Sim	Não
<b>1</b>	Papel Sulfite A4 para Impressora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	1 Caixa de disquete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	1 Caixa de CDRW – Min 24x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**EXEMPLO DE LAYOUT – SALA DE DENSITOMETRIA**

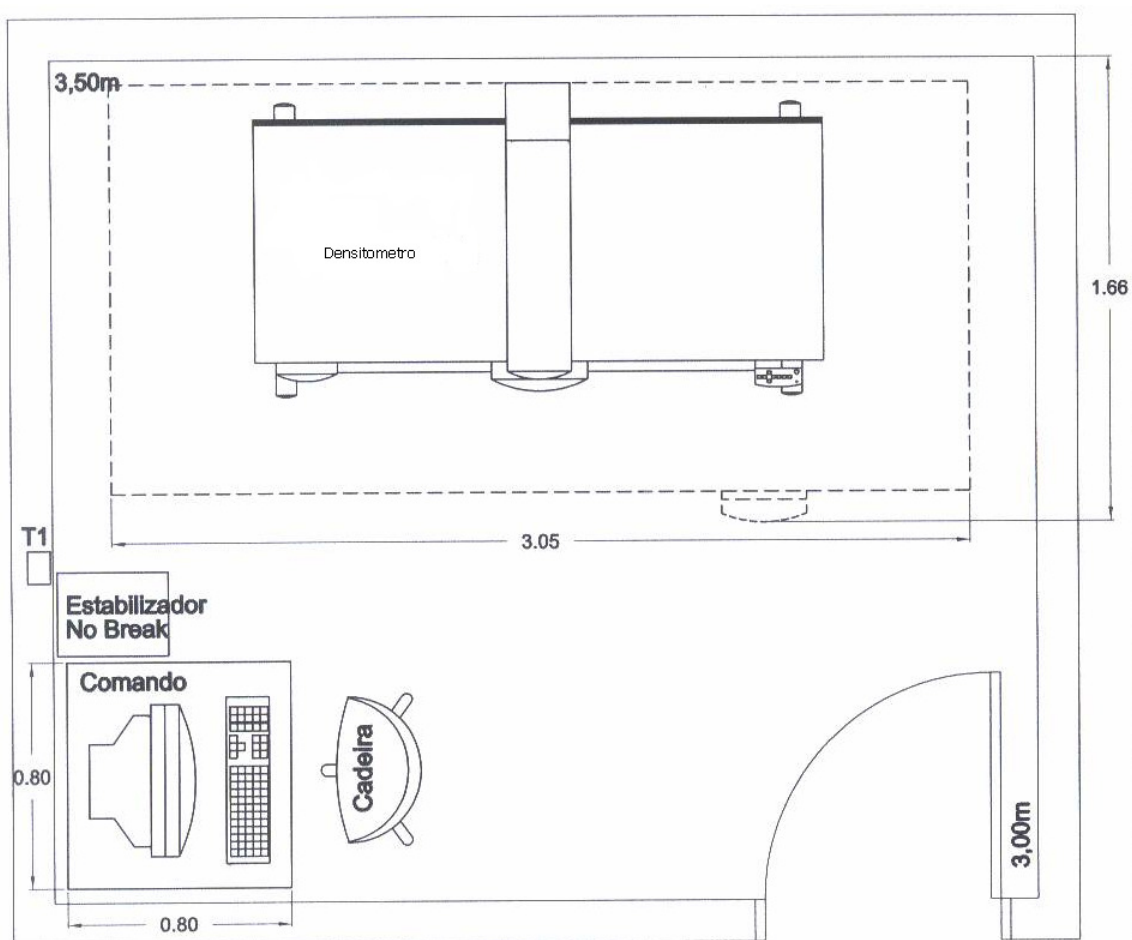

Declaro estar ciente e de pleno acordo com as informações contidas neste documento.

Nome Legível/Assinatura/Data  
(Cliente)